

NOTICE D'UTILISATION : MINI DAP

MINI DAP / Solution Diphotérine® :



Solution de lavage d'urgence pour projections de substances chimiques sur la peau.

Circonstances d'utilisations :

La MINI DAP est un spray contenant 200ml de solution Diphotérine®. La solution Diphotérine® enlève le produit chimique de la surface, stoppe la pénétration du produit chimique et, avec un lavage suffisamment prolongé, permet d'enlever ce produit chimique des tissus. Le volume a été optimisé pour une utilisation dans les 60 premières secondes.

La MINI DAP doit être à proximité des zones à risques pour permettre une utilisation optimale.

La solution Diphotérine® a une efficacité réduite sur l'acide fluorhydrique et ses dérivés acides. Dans ces circonstances, il est recommandé d'utiliser la solution Hexafluorine®, solution de lavage des projections d'acide fluorhydrique et fluorures en milieu acide.

Protocole d'utilisation :



La MINI DAP doit être utilisée comme première solution de lavage. Cependant, si vous ne disposez pas de la solution Diphotérine® sur le lieu de la projection, ne retardez jamais un lavage. A défaut, utilisez de l'eau même si elle entraîne un retard d'application de la solution Diphotérine® et réduit, par la perte de temps, l'efficacité de la solution.

A savoir : L'efficacité de la MINI DAP est assurée par les propriétés actives de la solution Diphotérine® sur les produits chimiques.

Utilisation : Il est recommandé, lors d'un accident, d'utiliser tout le contenu de la MINI DAP sur la zone concernée.

Utilisation en lavage retardée : Au-delà des 60 secondes, et en fonction du type de produit chimique, la lésion peut s'être déjà développée. Un lavage avec la solution Diphotérine® sur une lésion avérée améliorera la mise en place des soins secondaires. Dans ce cas, nous recommandons de poursuivre le lavage initial réalisé avec une MINI DAP de solution Diphotérine® par un deuxième lavage d'une durée idéale 3 à 5 fois le temps de contact.

Précautions d'emploi :

1. La MINI DAP est destinée à être rangée dans un endroit protégé des chocs et des chutes. Toute trace de chocs sur la MINI DAP peut générer un non-fonctionnement.
2. La MINI DAP doit être stockée dans un endroit non exposé aux fortes températures et au soleil – Il est également conseillé de ne pas exposer le produit au gel, car la solution aqueuse peut geler et n'être donc pas utilisable immédiatement. Il n'y a cependant pas de perte d'efficacité lorsque la solution Diphotérine® a dégelé. La température d'utilisation idéale est comprise entre 15 et 35°C.
3. Il convient de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement.
4. La MINI DAP doit être remplacée à échéance de la date de péremption figurant sur l'étiquette.
5. La MINI DAP doit être utilisée en lavage continu : la pulvérisation partielle ou non prolongée peut induire une diminution de la douleur mais ne permettra pas de laver complètement le produit chimique et/ou d'empêcher le développement de la lésion.

Élimination de la MINI DAP :

La solution Diphotérine® est un produit ne nécessitant pas de précautions particulières pour son élimination. Cependant, nous recommandons de suivre les règles d'élimination des sprays sous pression pour l'éviction de la MINI DAP de solution Diphotérine®.

Effets indésirables :

La solution Diphotérine® contenue dans la MINI DAP est une solution non irritante, non allergisante et non toxique.